

Hôpitaux ap. Universitaires hm de Marseille	APHM Service d'anatomie pathologique et neuropathologie Hôpital Timone 2 - 2e étage Réception : 29043	12PREP01D004
	CATALOGUE DES PRISES EN CHARGE	

Libellé de la demande	Nature / Etat	Support / Contenant	Documents obligatoires	Recommandations de transport		Conditions de conservation pour acheminement différé en raison des horaires du service	Fréquence de réalisation de l'analyse	Délai moyen de production du résultat
				Température	Délai max. à partir de la résection			
Examen extemporané	Biopsie / Pièce opératoire Etat frais	Container plastique adapté à la taille du prélèvement, +/- compresse imbibée de sérum φ	Bon standard MMF043	T° ambiante	10 mn	Retour au service et fixation au formol 4%	Quotidienne	15 à 30 mn
Cytologie sur lames	Etalement Séché à l'air	Porte-lame en plastique ou lames séparées par des trombones (pour éviter qu'elles ne se collent) dans un pot plastique transparent à couvercle rouge	Bon standard MMF043	T° ambiante	< 6h	T° ambiante Cytologies thyroïdiennes à 4°C	Quotidienne (Hebdomadaire pour les cytologies thyroïdiennes)	Thyroïdes 10j (±5 j) Autres 7j (± 2 j)
Cytologie de liquide	Urine Fixé au demi à l'alcool à 50°	Pot plastique transparent à couvercle rouge Tube sec	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	7j (± 2 j)
	Autres (épanchement..., LCR, liquide articulaire, ...) Etat frais				30 mn	4°C (sauf liquides articulaires à température ambiante)		
Frottis anal monocouche	Milieu liquide Fixé	Pot thinprep blanc Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	3 semaines (± 1 semaine)
Digestif, ganglion, brossage biliaire, thyroïde...		Pot cytolyt Fourni par le service		T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	Thyroïdes 10j (±5 j) Autres 7j (±2 j)
Pièce opératoire (Histologie standard)	Frais	Pot opaque vide	Bon standard MMF043	T° ambiante	30 mn	Fixation au formol à 4%	Quotidienne	15j (± 5j)
	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante		
Biopsie (Histologie standard)	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	10j (± 5j)
Biopsie musculaire et myocardique pour pathologie musculaire	Frais	Dans un tube sec placé dans la glace	Bon standard MMF043	Dans la glace	30mn	Fixation au formol 4% et si possible congélation -80°C ou azote liquide	Hebdomadaire	Biopsie musculaire 15j (± 5j) Biopsie myocardique 10j (±5 j)
Biopsie dans un contexte d'amylose : - myocardique - glande salivaire	Conservation Liquide de Michel A privilégier	Flacon plastique identifié par une couleur bleue, Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	5mn	4°C	Hebdomadaire	7j (± 2j)
	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%			24h	T° ambiante		

Libellé de la demande	Nature / Etat	Support / Contenant	Documents obligatoires	Recommandations de transport		Conditions de conservation pour acheminement différé en raison des horaires du service	Fréquence de réalisation de l'analyse	Délai moyen de production du résultat
				Température	Délai max. à partir de la résection			
Biopsie buccale et cutanée pour IF	Conservation Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue, Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	30mn	4°C	2 fois par mois	15j (± 5j)
Biopsie nerveuse	Frais (idéalement 4cm de long)	Dans un tube sec placé dans la glace	Bon standard MMF043	Dans la glace	30mn	Fixation au formol 4%	Hebdomadaire	15j (± 5j)
Biopsie pour rejet de greffe	1 carotte Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	3j (± 1j)
	1 carotte Formol 4% teinté d'éosine	Flacon plastique Fourni par le service						
	1 carotte Glutaraldéhyde	Flacon plastique identifié par une couleur verte Fourni par le service						
Biopsie rénale PBR de rein non greffé non tumoral	1 carotte Glutaraldéhyde	Flacon plastique identifié par une couleur verte Fourni par le service	Bon standard MMF043	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	7 j (± 2 j)
	1 carotte Liquide de Michel	Flacon plastique identifié par une couleur bleue Fourni par le service						
Fœtus avant 14 SA	Frais	Pot opaque vide	Dans une enveloppe jointe au bon dédié fœtus-placenta MMF048 : Fiche de fœtopathologie Autorisation d'autopsie Certificat médical d'IMG pour les maternités extérieures	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	4 à 8 semaines
Fœtus d'au moins 14 SA	Frais	Container bleu de transport	Dans une enveloppe jointe au bon dédié fœtus-placenta MMF048 : Fiche de fœtopathologie Autorisation d'autopsie Restitution du corps Suivi transports Certificat d'accouchement	T° ambiante	24h	4°C	Quotidienne	4 à 8 semaines
Placenta	Fixé	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon fœtus-placenta MMF048	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	4 à 8 semaines

Libellé de la demande	Nature / Etat	Support / Contenant	Documents obligatoires	Recommandations de transport		Conditions de conservation pour acheminement différé en raison des horaires du service	Fréquence de réalisation de l'analyse	Délai moyen de production du résultat
				Température	Délai max. à partir de la résection			
Pour le conditionnement et l'acheminement des fœtus et placentas, se référer au document institutionnel :								
PCR-000948 Prise en charge et traçabilité des corps des fœtus AP-HM à destination des chambres mortuaires ou du service d'ACPNP :								
disponible sur Normea / Décès / Enfants nés sans vie et fœtus / Traçabilité et suivi du fœtus								
Cerveau pour Creutzfeldt Jakob	Frais	Pot opaque vide + 1 sachet	Bon standard MMF043	T° ambiante	1h	4°C	Mensuelle	3 à 6 mois
Préparation technique des échantillons autopsiques	Cassettes dans pot formolé à 4%	Pots prêts à l'emploi contenant du formol à 4%	Bon dédié autopsie MMF049 : Bon de demande de prise en charge technique pour une autopsie	T° ambiante	24h	T° ambiante	Quotidienne	NA*
Remarque : Les demandes sur matériel archivé sont détaillées dans les prestations post-analytiques sur le site internet								
http://fr.ap-hm.fr/site/acnpn								